

Ambroise

HANDLEIDING FOTOMAATNAME ENKEL-VOETORTHESE (EVO)



Twekkeler Es 24, 7547 SM Enschede, Nederland
tel: +31 53 4302836 | info@ambroise.nl | www.ambroise.nl
www.youtube.com/AmbroiseHolland | www.facebook.com/AmbroiseHolland

Fotomaatname voor de enkel-voetorthese (EVO)

Aandachtspunten bij de voorbereiding van een fotomaatname



- A. Markeer de laterale malleolus van de enkel.
Trek de verticale lijn door over het hielbeen tot de onderkant van de voet.



- B. Markeer de mediale malleolus van de enkel.
Trek de verticale lijn door over het hielbeen tot de onderkant van de voet.



- C. Bepaal het fibulakopje.



- D. Markeer de laterale zijde van het been, ter hoogte van het fibulakopje. Trek de horizontale lijn door tot achter het dikste punt van het been.



- E. Plaats de voet op het voetplankje.



- F. Markeer de grond op minstens 1m afstand van het plankje.

Aandachtspunten bij het maken van de foto's



G. Fotografeer de laterale foto met het toestel op **vloerhoogte** op min. 1 meter afstand van het plankje. Houd het fototoestel verticaal (portret).



H. Zorg dat het hele onderbeen + voetplaat en - in dit aanzicht - de **achterste** pin zichtbaar is. De omcirkelde punten moeten zichtbaar zijn.



I. Fotografeer het achteraanzicht van het been.



J. Zorg dat het hele onderbeen + voetplaat en pin zichtbaar is. In dit aanzicht de pin aan de **zijkant** (ter hoogte malleolus) plaatsen. De omcirkelde punten moeten zichtbaar zijn.



K. De derde foto wordt gemaakt van de mediale zijde.



L. Zorg dat het hele onderbeen + voetplaat en pin zichtbaar is. In dit aanzicht de pin in het **achterste** gat plaatsen. De omcirkelde punten moeten zichtbaar zijn op de foto.



. Ambroise

Twekkeler Es 24, 7547 SM Enschede, Nederland
tel: +31 53 4302836 | info@ambroise.nl | www.ambroise.nl
www.youtube.com/AmbroiseHolland | www.facebook.com/AmbroiseHolland
