

# Ambroise

## ANLEITUNG FOTOMAßNAHME KNÖCHEL- UND FUßORTHESE (AFO)



---

Twekkeler Es 24, 7547 SM Enschede, Niederlande  
tel: +31 53 4302 836 | [info@ambroise.nl](mailto:info@ambroise.nl) | [www.ambroise.nl](http://www.ambroise.nl)  
[www.youtube.com/AmbroiseHolland](http://www.youtube.com/AmbroiseHolland) | [www.facebook.com/AmbroiseHolland](http://www.facebook.com/AmbroiseHolland)

---

## Fotomaßnahme für die Knöchel- und Fußorthese (AFO)

### Wichtige Punkte bei der Vorbereitung einer Fotomaßnahme



A. Markieren Sie den lateralen Malleolus am Fußknöchel. Ziehen Sie eine vertikale Linie über das Fersenbein bis zur Fußunterseite.



B. Markieren Sie den medialen Malleolus am Fußknöchel. Ziehen Sie eine vertikale Linie über das Fersenbein bis zur Fußunterseite.



C. Bestimmen Sie den oberen Beginn der Fibula.



D. Markieren Sie die laterale Seite des Beins auf der Höhe des Beginns der Fibula. Ziehen Sie eine horizontale Linie, die bis über den breitesten Punkt des Beins hinausgeht.



E. Stellen Sie den Fuß auf das Brettchen.



F. Markieren Sie auf den Boden einen Abstand von mindestens einem Meter.

## Wichtige Punkte beim Schießen der Fotos



G. Schießen Sie das laterale Foto mit Ihrem Gerät auf der Höhe des Fußbodens. Der Abstand zum Brettchen muss hierbei mindestens einen Meter betragen. Achten Sie darauf, ein vertikales Foto zu schießen (Portrait).



H. Achten Sie darauf, dass der gesamte Unterschenkel mit der Fußplatte und – in dieser Ansicht – der **hinten gelegene Stab** sichtbar ist. Die eingekreisten Punkte müssen auf dem Bild zu sehen sein.



I. Schießen Sie ein Foto von der Beinrückseite.



J. Achten Sie darauf, dass der gesamte Unterschenkel, die Fußplatte und der Stab gut sichtbar sind. In dieser Ansicht ist der Stab an der Seite (auf der Höhe des Malleolus) zu platzieren. Die eingekreisten Punkte müssen auf dem Bild zu sehen sein.



K. Schießen Sie das dritte Foto von der medialen Seite.



L. Achten Sie darauf, dass der gesamte Unterschenkel, die Fußplatte und der hintere Stab gut sichtbar sind. In dieser Ansicht muss der Stab im hintersten Loch platziert werden. Die eingekreisten Punkte müssen auf dem Bild zu sehen sein.



**. Ambroise**

Twekkeler Es 24, 7547 SM Enschede, Niederlande  
tel: +31 53 4302 836 | [info@ambroise.nl](mailto:info@ambroise.nl) | [www.ambroise.nl](http://www.ambroise.nl)  
[www.youtube.com/AmbroiseHolland](http://www.youtube.com/AmbroiseHolland) | [www.facebook.com/AmbroiseHolland](http://www.facebook.com/AmbroiseHolland)

---