

# Ambroise

## ANLEITUNG FOTOMAßNAHME STATISCHE HAND-/PULSORTHESE (SHS)



---

Twekkeler Es 24, 7547 SM Enschede, Nederland  
tel: +31 53 4302 836 | [info@ambroise.nl](mailto:info@ambroise.nl) | [www.ambroise.nl](http://www.ambroise.nl)  
[www.youtube.com/AmbroiseHolland](http://www.youtube.com/AmbroiseHolland) | [www.facebook.com/AmbroiseHolland](http://www.facebook.com/AmbroiseHolland)

---

## Fotomaßnahme für die statische Hand- /Pulsorthese (SHS)

### Wichtige Punkte bei der Vorbereitung einer Fotomaßnahme




A. Stellen Sie sicher, dass die spastische Hand entspannt ist. Ihr Therapeut kann Ihnen hierbei helfen



B. Platzieren Sie die Hand auf dem Brettchen für den Messvorgang. Das Klettband sorgt dafür, dass die Hand an der richtigen Stelle bleibt.



C. Platzieren Sie den Stab an der Daumenseite der Hand.

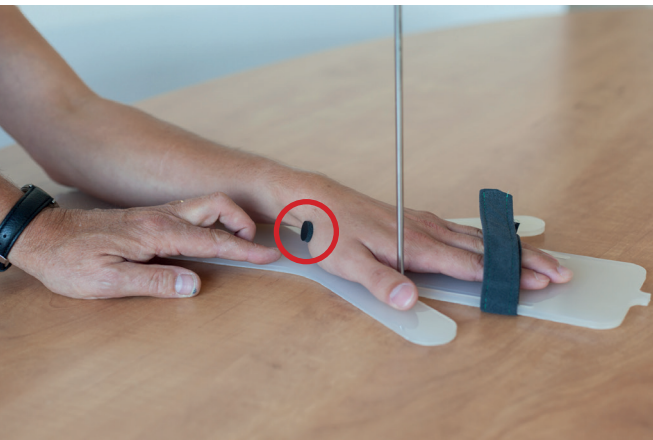

D. Markieren Sie die Höhe des Processus Styloideus Radii.




E. Markieren Sie auch die Höhe des Processus Styloideus Ulnae auf dem Handgelenk.



F. Markieren Sie zum Schluss die Ellbogenhöhle.

## Wichtige Punkte beim Schießen der Fotos

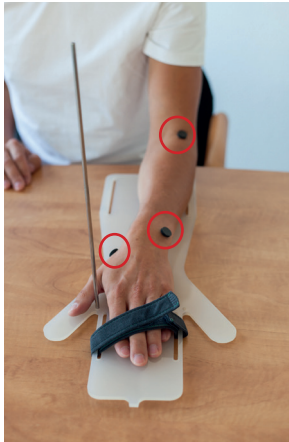

G. Die Fotos können geschossen werden, sobald die drei Marker auf dem Arm angebracht sind.



H. Schießen Sie ein Foto mit einem Meter Abstand. Das Foto muss senkrecht und überhalb des Unterarms aufgenommen werden. Achten Sie darauf, dass alle Marker sichtbar sind.



I. Fotografieren Sie die mediale Seite des Arms mit einem Abstand von einem Meter. Achten Sie darauf, dass der mediale Marker zusammen mit dem Stab und dem Brettchen sichtbar sind.



. Ambroise

Twekkeler Es 24, 7547 SM Enschede, Nederlande  
tel: +31 53 4302 836 | [info@ambroise.nl](mailto:info@ambroise.nl) | [www.ambroise.nl](http://www.ambroise.nl)  
[www.youtube.com/AmbroiseHolland](http://www.youtube.com/AmbroiseHolland) | [www.facebook.com/AmbroiseHolland](http://www.facebook.com/AmbroiseHolland)

---