



ANLEITUNG AMBROISE FOTOMAßNAHME UTX UND GENUX

Twekkeler Es 24, 7547 SM Enschede, Niederlande
tel: +31 53 4302836 | info@ambroise.nl | www.ambroise.nl
www.youtube.com/AmbroiseHolland | www.facebook.com/AmbroiseHolland

Ambroise Maßnahmen anhand eines Fotos UTX und GENUX OA

Wichtige Hinweise für die Vorbereitung des Maßnehmens anhand eines Fotos



A. Falten Sie das Poster auf der schwarzen Linie unter dem Logo auf dem Boden/ an der Wand.



B. Messen Sie einen Abstand von 2 Metern zur Wand ab.



C. Markieren Sie den zuvor gemessenen Abstand auf dem Boden.



D. Bestimmen Sie die anatomische Knieachse.



E. Markieren Sie die laterale Beinseite auf Höhe der anatomischen Achse.



F. Markieren Sie den lateralen Knöchel des Fußgelenks.



G. Markieren Sie den medialen Knöchel des Fußgelenks.



Wichtige Punkte beim Schießen der Fotos

H. Frontales Foto: Stellen Sie sicher, dass die Hacke an der schwarzen Linie liegt. Beispielabbildung **I** ist fehlerhaft, da die Hacke die hintere Linie nicht berührt.



J. Sorgen Sie dafür, dass die Füße gerade nach vorne zeigen, sodass alle Markierungen für das frontale Foto sichtbar sind. Achten Sie darauf, dass das Bein nicht nach innen oder außen gedreht ist. Beispielabbildung **K** ist fehlerhaft, da der Fuß nach außen gedreht ist.



L. Beim sagittalen Foto: Stellen Sie sicher, dass die mediale Seite des Fußes an der Linie liegt. Beispielabbildung **M** ist fehlerhaft, da der Fuß die Linie nicht vollständig berührt.



N. Nehmen Sie das frontale Foto mit 2 Metern Abstand von der Wand auf Kniehöhe auf. Halten Sie den Apparat vertikal (Portrait).



Achten Sie darauf, dass minimal 3 der 4 Eckmarkierungen des Rasters auf dem Foto sichtbar sind.

Q. Nehmen Sie das sagittale Foto mit 2 Metern Abstand von der Wand auf Kniehöhe auf. Halten Sie den Apparat vertikal. (Sagittal)




O. Achten Sie darauf, dass die Beine vollständig von den Füßen bis zu den Leisten abgebildet werden. Beispielabbildung P ist fehlerhaft, da das Hemd die Leisten verhüllt.



S. Messen Sie den Abstand des lateralen Fußknöchels zum Boden. (UTX)



T. Messen Sie den Abstand des medialen Fußknöchels zum Boden. (UTX)

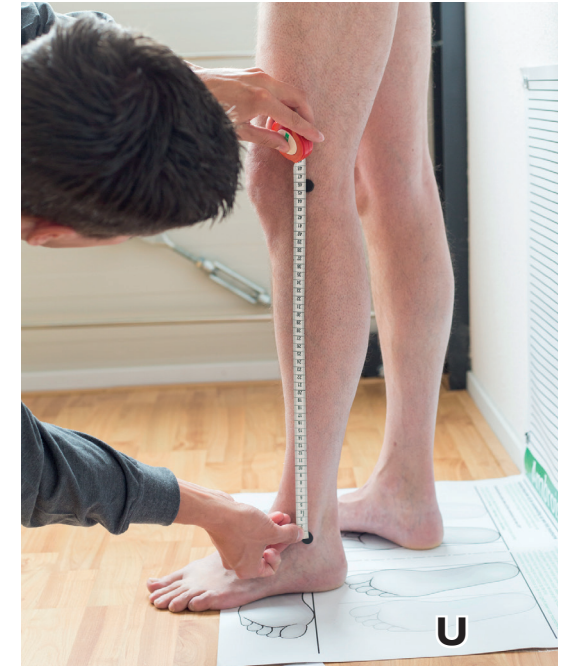

U. Messen Sie den Abstand des lateralen Fußknöchels bis zur Knieachse. (UTX)



V. Notieren Sie die Maße im Genux/UTX Messprotokoll.



Twekkeler Es 24, 7547 SM Enschede, Niederlande
tel: +31 53 4302836 | info@ambroise.nl | www.ambroise.nl
www.youtube.com/AmbroiseHolland | www.facebook.com/AmbroiseHolland
